


# TESTUJEME SE, ABY VE ŠKOLE BYLO BEZPEČNO

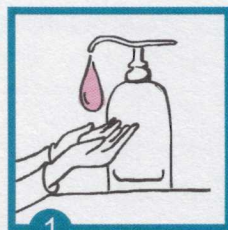


1 Vydezinfikuješ si ruce



2 Posadíš se ke stolu




3 Dostaneš instrukci

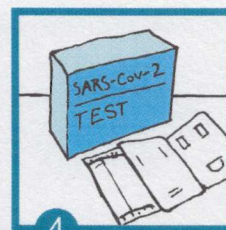


4 Rozbalíš si test



5 Tyčinkou 5x otočíš v každé nosní dírce

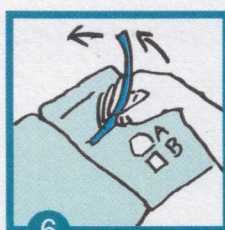


6 Odstraníš fólii z testu

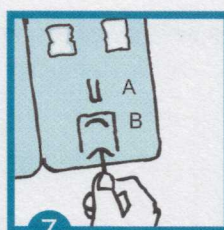


7 Prostrčíš konec tyčinky otvorem B do A



8 Test se zakape roztokem

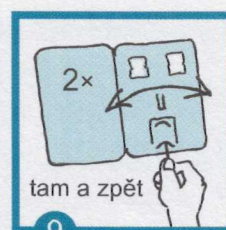


9 Otočíš 2x tyčinkou tam a zpět

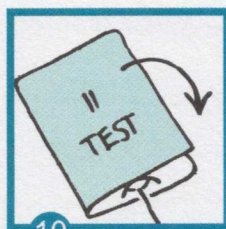

10 Zavřeš test



11 Stopujeme 15 minut

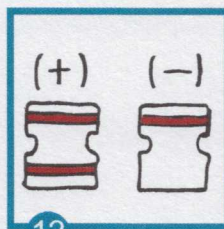

12 A máš tu výsledek



13 Ukazuje to něco jiného? Výsledek se zaznamená test je neplatný, musíš se otestovat znovu



14 Výsledek se zaznamená



15 Test vyhodíš a vydezinfikuješ si ruce




16 Jsi negativní: pokračuješ do výuky s ostatními



17 Jsi pozitivní: počkáš na rodiče a jdete domů



18 Škola ti vystaví potvrzení o tom, že ti test vyšel pozitivně

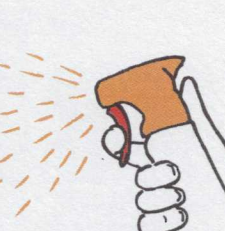

MŠMT

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

npi


Národní pedagogický institut  
České republiky



# Singclean® **GT** GOOD TEST

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ PRO ŠKOLY

## RYCHLÝ NÁVOD

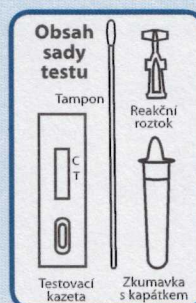


### NEGATIVNÍ

Je-li test negativní, je testovanému umožněna účast na prezenční výuce.

### POZITIVNÍ

Při pozitivním výsledku je testovaný ihned odeslán do izolační místnosti. Je nutné vydezinfikovat všechny plochy, kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.

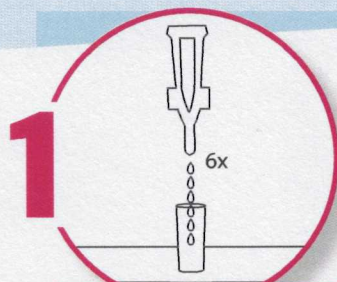

# 1

Lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru. Stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 6 kapek, aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.



# 2

Zasuňte tampon do nosní díry přibližně 2,5 cm hluboko. Přejedte jí 5x podél sliznice nosní díry, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní díry.




# 3

Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem a otočte jej asi 10x. Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.



1 min

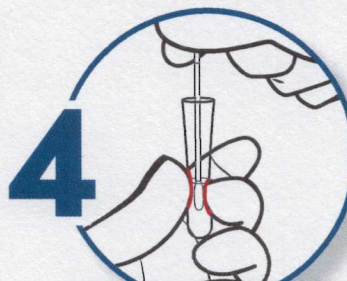


# 4

Stiskněte prsty zkumavku a vytažte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny. Nainstalujte odkapávač na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu stát.



1 min

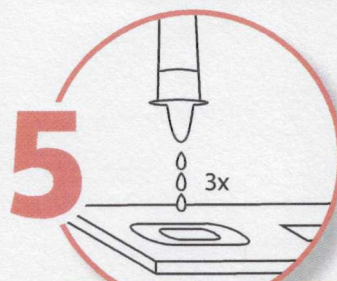


# 5

Oteřete sáček a z hliníkové fólie vyjměte testovací kazetu. Nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku do otvoru pro vzorek v testovací kazetě a spusťte stopky.



15 min

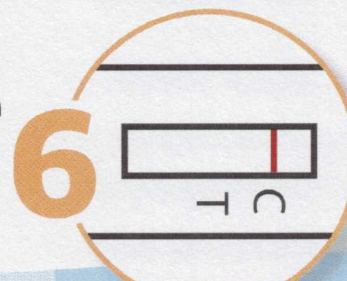


# 6

Počkejte, až se v okénku na testovací kazetě objeví barevný proužek. Výsledek by měl být přečten za 15 minut. Nevyhodnocujte test po uplynutí 20 minut.


### Interpretace výsledků



Pozitivní

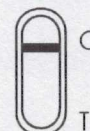

Negativní

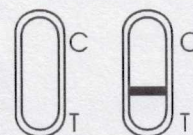

Neplatný

WWW.GOODTEST.CZ